


Xtern AFO

Think outside the shoe

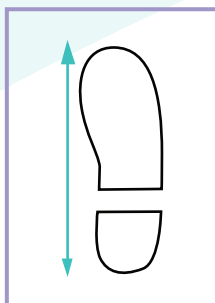

Kenmerken

- › Uniek uitwendig aangebrachte orthese geeft ongeëvenaard comfort aan de voet.
- › Zeer geschikt voor berg op en af te gaan.
- › Hurken en op je knieën zitten zonder problemen.
- › Zeer slijtvast.
- › De symmetrische vorm past zowel op linker- als rechterschoen.

Indicaties

- › Dropvoet

Vernieuwingen Xtern

- › Verbeterde velcro strap
- › 50 % sneller te monteren dan vorige versie (FS 3000)
- › Minder bevestigingsschroeven en boren vereist
- › Vereenvoudigde montage instructies
- › Extra hielstuikmaten voor betere grip op hielcontour van de schoenen
- › Licht aangepaste maattabel voor betere pasvorm


Maat	Schoenmaat	Code
Pedi	24-31	TM100100-SA-P
Small	31-39	TM100100-SA-S
Medium	38-43	TM100100-SA-M
Large	43-51	TM100100-SA-L

TM109100-x



Brace plaatsingsschema voor ideale voetheffing per schoenmaat.

Zo weet u zeker dat de hefboom van de brace voor de schoenmaat optimaal is.

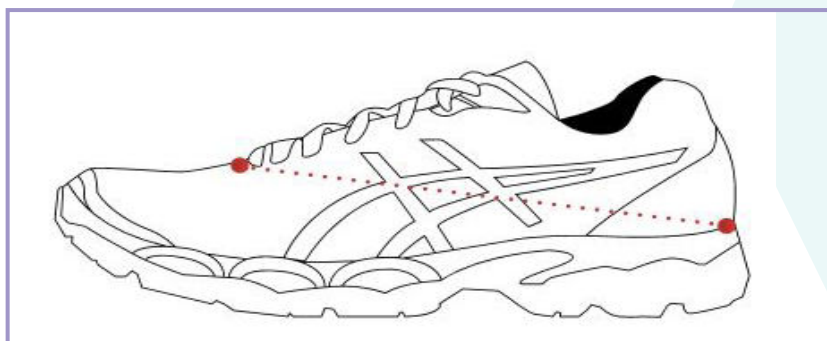

Maat	Distale oogje - hak	Voet lengte (cm)	Schoenmaat EU
Pedi	128	16	24
Pedi	133	16,5	25
Pedi	137	17	25,5
Pedi	141	17,5	26
Pedi	145	18	27
Pedi	149	18,5	28
Pedi	153	19	28,5
Pedi	156	19,5	29
Pedi	158	20	30
Pedi/small	160	20,5	31
Pedi/small	163	21	31,5
Pedi/small	168	21,5	32
Pedi/small	171	22	33
Small	175	22,5	34
Small	180	23	34,5
Small	183	23,5	35
Small	187	24	36
Small	190	24,5	37
Small	193	25	37,5
Small	196	25,5	38

Maat	Distale oogje - hak	Voet lengte (cm)	Schoenmaat EU
Small/medium	199	26	39
Small/medium	203	26,5	40
Small/medium	205	27	40,5
Medium	208	27,5	41
Medium	211	28	42
Medium	214	28,5	43
Medium	217	29	43,5
Medium	220	29,5	44
Medium	223	30	45
Medium	226	30,5	46
Large	230	31	46,5
Large	233	31,5	47
Large	237	32	48
Large	241	32,5	49
Large	244	33	49,5
Large	248	33,5	50
Large	252	34	51